

**2012年 6月 1日改訂 (第3版)

*2012年 5月 25日改訂 (第2版)

2008年 6月 2日作成

医療機器届出番号	43B2X10001000030

医療用品 (4) 整形用品
JMDNコード 34864000
一般医療機器 救急絆創膏
ファストエイド


再使用禁止

【禁忌・禁止】

- ・ 再使用禁止
- ・ 粘着部を創傷面に当てないこと。

【形状・構造及び原理等】

本品は粘着部にポリネット付き不織布 (パッド) を貼り付け、粘着部を剥離紙で覆い、コールドシールで被覆したものです。

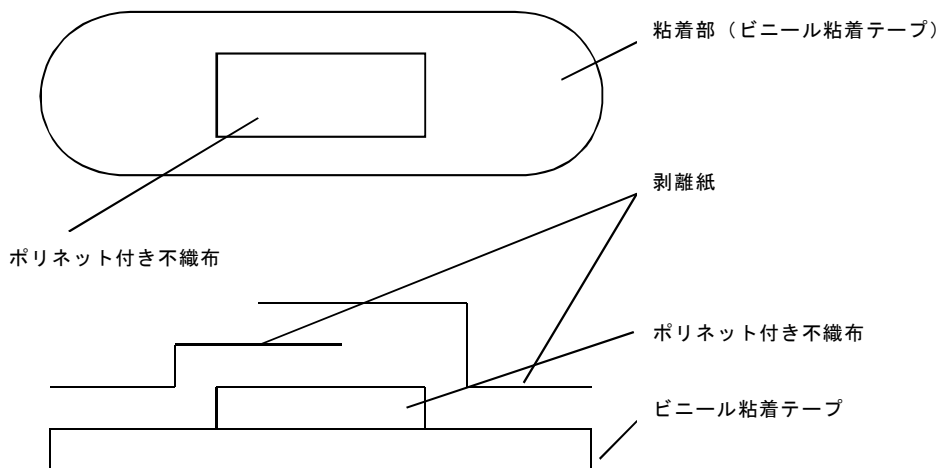

(断面図)

【使用目的・効果又は効能】

創傷面の保護

【品目仕様等】

無滅菌

【操作方法又は使用方法等】

- * 創傷面を清潔にして、パッド部分を創傷面にあて、両側の粘着テープで固定して、使用してください。

【使用上の注意】

1. 本品の使用により「かゆみ」「かぶれ」などが発生した場合は、使用を中止し医師又は薬剤師に相談してください。
- * 2. パッド部が濡れたり、汚れたまま放置すると傷の治りが悪くなりますので、新しいものと貼り替えてください。

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】

1. 小児の手の届かないところに保管してください。
2. 直射日光を避け、なるべく湿気の少ない涼しいところに保管してください。

**** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】**

製造販売業者の氏名：キョーリキ株式会社

住 所：〒861-5514 熊本県熊本市北区飛田3丁目3-65

電 話 番 号：096-345-1234（代表）

製造業者の氏名：キョーリキ株式会社

住 所：〒861-5514 熊本県熊本市北区飛田3丁目3-65

電 話 番 号：096-345-1234（代表）